


Instrukcja nagrywania zdjęć 2D w dużym formacie na CD:

1. Na pulpicie (opcja zalecana) tworzymy folder „Zdjęcia do nagrania”.
2. Wchodzimy do programu Dental Imaging Software, wyszukujemy kartotekę pacjenta, którego badanie chcemy nagrać na płytę.
3. Na zdjęciu klikamy prawym klawiszem myszy i z menu wybieramy „Wyślij do foldera”.

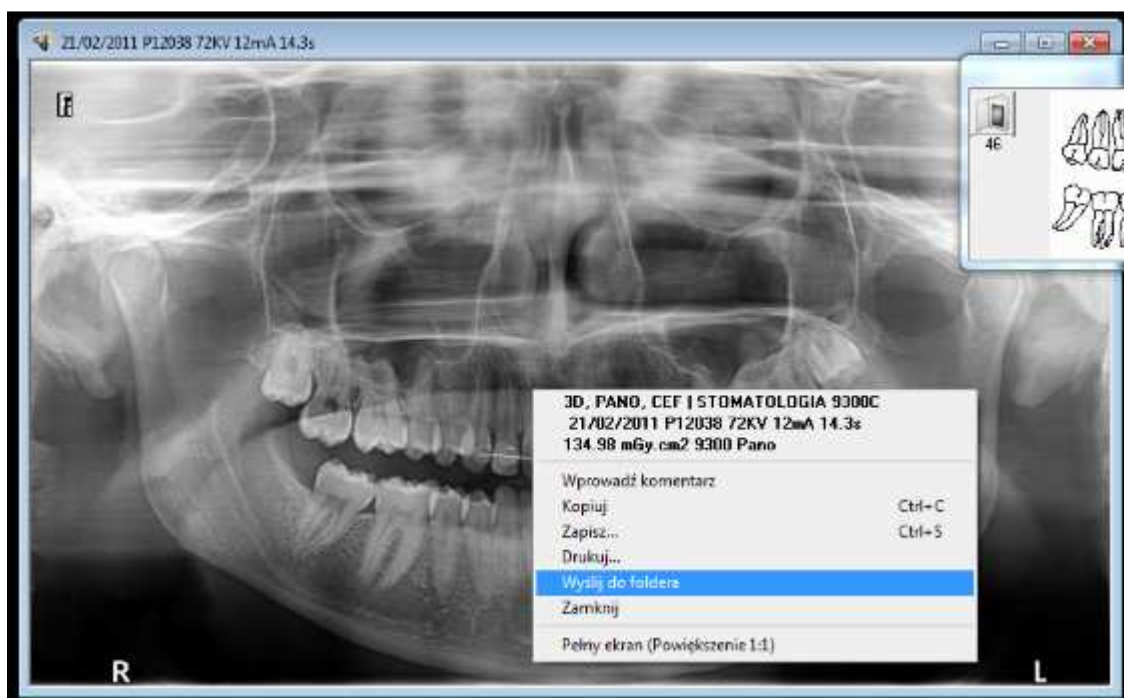


4. Pojawia się okno, w którym wybieramy 3 rzeczy:

Pkt. 1 – wskazujemy katalog, w którym znajdują się zdjęcia do nagrania (katalogu utworzony na pulpicie).

Pkt. 2 – wybieramy format pliku – dla zdjęć w oryginalnym formacie używamy „Pliki Carestream – duży format”

Pkt. 3 – zaznaczamy pole Przeglądarka 2D – co pozwoli na otwieranie zdjęcia na dowolnym komputerze, nawet jeżeli oprogramowanie do obsługi zdjęć nie jest zainstalowane.

Zatwierdzamy ustawienia przyciskiem OK na dole okna.

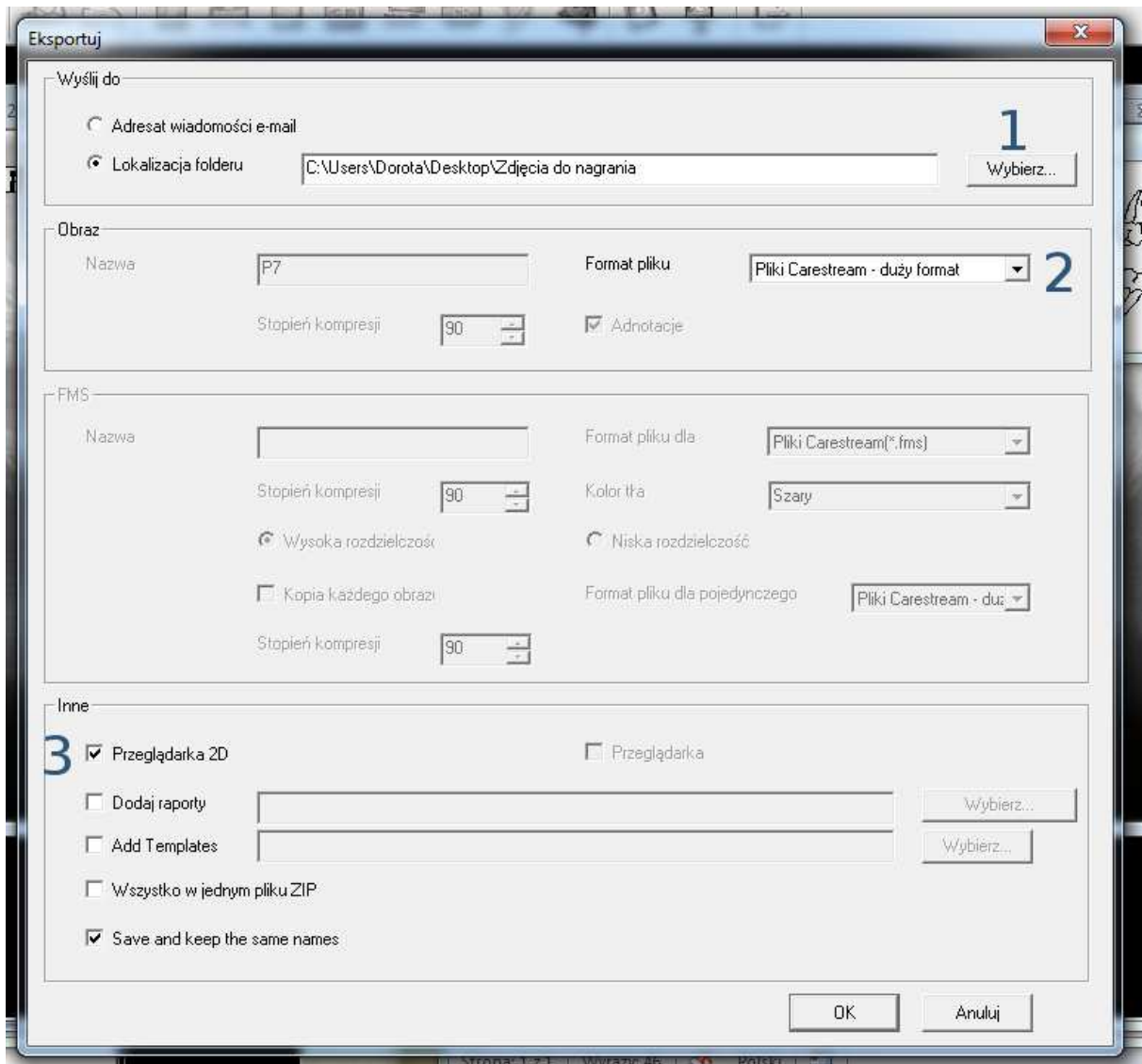

5. Pliki są gotowe do nagrania. Korzystamy z dowolnego programu do nagrywania płyt CD – zdjęcia nagrywamy jako „dane”.