

# Instrukcja dodawania implantów do biblioteki w przeglądarce CS 3D Imaging

1. Po uruchomieniu badania tomograficznego w przeglądarce CS 3D Imaging wybieramy opcję w prawym, górnym rogu:



2. Po kliknięciu na białą strzałkę, otworzy się nowe okno. Tutaj możemy wybrać interesującą nas funkcję – dodanie nowego producenta implantów z bazy Carestream, aktualizacja aktualnej bazy implantów, usunięcie danego producenta z naszego komputera, a także zaimportowanie implantów z pliku. Aby dodać nowe implanty, wybieramy pierwszą opcję i klikamy Next:



