

Procedura postępowania – RTG

PROCEDURA URUCHOMIENIA APARATU

Jeżeli aparat był nieużywany przez okres dłuższy niż 7 dni, to przed wykonaniem **pierwszego badania**, konieczne jest wdrożenie następującej procedury.

Dla aparatu CS 2100*:

1. Ustawiamy następujące parametry : 60 kV – 7 mA – 0.1 s. Wykonujemy ekspozycję.
2. Ustawiamy następujące parametry : 60 kV – 7 mA – 0.5 s. Wykonujemy ekspozycję.
3. Ustawiamy następujące parametry : 60 kV – 7 mA – 1 s. Wykonujemy ekspozycję.
4. Ustawiamy następujące parametry : 60 kV – 7 mA – 1 s. Wykonujemy ekspozycję.

*Aparat CS 2100, ma stałe parametry kV oraz mA, regulujemy tylko parametr czasu.

Dla aparatu CS 2200*:

1. Ustawiamy następujące parametry : 60 kV – 7 mA – 0.1 s. Wykonujemy ekspozycję.
2. Ustawiamy następujące parametry : 60 kV -7 mA – 0.5 s. Wykonujemy ekspozycję.
3. Ustawiamy następujące parametry : 60 kV – 7 mA – 1 s. Wykonujemy ekspozycję.
4. Ustawiamy następujące parametry : 70 kV – 7 mA – 0.1 s. Wykonujemy ekspozycję.
5. Ustawiamy następujące parametry : 70 kV – 7 mA – 0.5 s. Wykonujemy ekspozycję.
6. Ustawiamy następujące parametry : 70 kV – 7 mA – 1 s. Wykonujemy ekspozycję.

*Do uzyskania odpowiednich czasów, niezbędne jest przestawienie aparatu w tryb manualny. Używamy przycisku zmiany trybu, zlokalizowanego po prawej stronie sterownika, włączając program "ręki".