

Procedura postępowania - UNIT STOMATOLOGICZNY

UKŁAD SSĄCY:

1. Wyczyścić lub wymienić sitko ssaków na nowe.
2. Ustawić unit w wysokiej pozycji.
3. Przeprowadzić standardową dezynfekcję ssaków (najlepiej płynem OROTOR PLUS firmy DURR DENTAL zalecanym przez A-dec).
4. Przeprowadzić dezynfekcję spluwaczki.
5. Po upływie min pół godziny przepłukać system ssący letnią wodą (ok. 2 litry).
6. Przy otwartych zaworach rękojeści ssaka i ślinociągu uruchomić ssaki/pompę ssącą na 2-3 min, tak żeby pompa wyssała zalegającą ciecz w układzie ssącym.
7. Wyczyścić sitko przy pompie.
8. Po dezynfekcji ssaków i przepłukaniu wodą sprawdzić stan sitka ssaków w unicie – jeśli jest brudne, wyczyścić lub wymienić na nowe.
9. Rękojeść ssaka i ślinociągu rozebrać, wyczyścić, nasmarować smarem silikonowym, złożyć.

KOŃCÓWKI STOMATOLOGICZNE:

1. Dobrze naoliwić końcówki.
2. Założyć na unit i uruchomić je po kolei na kilkanaście sekund z założonym wiertłem z włączonym sprayem wodno-powietrznym.
3. Ściągnąć końcówki z rękawów, ponownie je naoliwić i odłożyć główką w dół.

UKŁAD WODNY UNITU:

Mimo stosowania tabletek A-dec ICX należy:

1. Opróżnić butelkę na wodę destylowaną i ją wysuszyć.
2. Nasmarować oring gniazda butelki na wodę destylowaną.
3. Założyć suchą butelkę i spuścić całą wodę z dmuchawki lekarza i asysty.
4. Uruchomić rękaw turbinowy (bez turbiny) z włączonym sprayem wodno-powietrznym tak długo, aż przestanie z rękawa lecieć woda.
5. Tak samo postąpić z pozostałymi rękawami (bez końcówek) jak z rękawem turbinowym.

ZASADY OGÓLNE:

1. Tapicerkę unitu, stołków lekarza i asysty umyć i zdezynfekować (najlepiej środkami FD-360, FD-366 firmy DURR DENTAL lub Praxipolish® Plus firmy HAGER WERKEN zalecanymi przez A-dec), po przeprowadzonych czynnościach przetrzeć tapicerkę wilgotnym ręcznikiem papierowym.
2. Wszystkie miejsca delikatne i wrażliwe umyć i zdezynfekować środkiem FD-366. <https://youtu.be/GiU-xkZVWoA>
3. Wyłączyć pompę ssącą.
4. Wyłączyć kompresor i spuścić z niego powietrze (zbiornik kompresora zostawić pusty).
5. Zakręcić wodę podłączoną do unitu, a nawet w całym gabinecie.
6. Wyłączyć unit.
7. Wyłączyć bezpieczniki w skrzynce elektrycznej od unitu pompy i kompresora.