

I. Przygotowanie montażowe

Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Państwu w przygotowaniu się do instalacji drukarki 3D Shining AccuFab-L4D. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy jak zwykle do Państwa dyspozycji.

II. Wymogi dla komputerów

Poniżej przedstawiono zalecane wymagania dla obsługi programu i urządzeń. Proszę pamiętać, że zakup komputera o wyższych parametrach przyczyni się do szybszej pracy programów, co znacznie poprawi komfort Państwa pracy.

Drukarka AccuFab-L4D	Procesor: minimum Intel i5 8-ej generacji Pamięć RAM: min. 16 GB Karta graficzna (koniecznie dedykowana karta Nvidia): min. Nvidia GTX 1050 Ti OS: Windows 10 (wersja min. 1809) 64bit; zalecana edycja Professional
-----------------------------	---

III. Przygotowanie pomieszczenia

Pomieszczenie, w którym będzie zainstalowane urządzenie, powinno być bez pyłowe, pozbawione dostępu światła słonecznego i wentylowane. Należy zapewnić stabilne i bezwibracyjne podłoże oraz zasilanie z gniazdka sieciowego w miejscu instalacji urządzenia.

Drukarka AccuFab-L4D	Temperatura w pomieszczeniu: 20°C - 35°C Wilgotność: 30% - 70% Stanowisko pod drukarkę: czysta, płaska i pozioma powierzchnia
-----------------------------	---