

I. Przygotowanie montażowe

Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Państwu w przygotowaniu się do instalacji drukarki 3D Shining AccuFab-L4D. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy jak zwykle do Państwa dyspozycji.

II. Wymogi dla komputerów

Poniżej przedstawiono zalecane wymagania dla obsługi programu i urządzeń. Proszę pamiętać, że zakup komputera o wyższych parametrach przyczyni się do szybszej pracy programów, co znacznie poprawi komfort Państwa pracy.

Drukarka AccuFab-L4D AccuFab-CEL AccuFab F1	Procesor: minimum Intel i7 12-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Karta graficzna (koniecznie dedykowana karta Nvidia): min. Nvidia RTX 2060 (min. 6GB VRAM) OS: Windows 10 (wersja min. 1809) 64bit; zalecana edycja Professional
--	--

III. Przygotowanie pomieszczenia

Pomieszczenie, w którym będzie zainstalowane urządzenie, powinno być bez pyłowe, pozbawione dostępu światła słonecznego i wentylowane. Należy zapewnić stabilne i bezwibracyjne podłoże oraz zasilanie z gniazdka sieciowego w miejscu instalacji urządzenia.

Drukarka AccuFab-L4D AccuFab-CEL AccuFab F1	Temperatura w pomieszczeniu: 20°C - 35°C Wilgotność: 30% - 70% Stanowisko pod drukarkę: czysta, płaska i pozioma powierzchnia
--	---

Proszę zapewnić wystarczającą ilość miejsca na drukarkę zgodnie z podanymi wymiarami.

Drukarka	Wymiary drukarki	Wymiary drukarki z otwartą pokrywą
AccuFab-L4D AccuFab-CEL	32 × 32 × 55 cm (szer. × gł. × wys.)	32 × 49 × 68 cm (szer. × gł. × wys.)
AccuFab F1	36 × 34 × 58 cm (szer. × gł. × wys.)	35 × 47 × 75 cm (szer. × gł. × wys.)