

Załącznik nr 5 dla sprzętu medycznego z serii:
IS 3800 / Imprevo / Aoralscan 3 / Aoralscan L / Elite

I. Przygotowanie do montażu

Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Państwu w przygotowaniu się do instalacji skanerów wewnętrznych marek DEXIS i SHINING. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy jak zwykle do Państwa dyspozycji.

II. Wymogi dla komputerów

Poniżej przedstawiono zalecane wymagania dla obsługi programu i urządzeń. Proszę pamiętać, że zakup komputera o wyższych parametrach przyczyni się do szybszej pracy programów, co znacznie poprawi komfort Państwa pracy.

Producenci skanerów wewnętrznych odradzają używania komputerów z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX Series xx50 ze względu na ich obniżoną wydajność.

Typ skanera	Typ komputera / wymagania sprzętowe
Skaner CS 3800	PC stacjonarny lub laptop: Procesor: minimum i9 13-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. 1TB SSD Karta graficzna ekran: min. Nvidia RTX 4080 1920x1080 OS: min. Windows 11; zalecana edycja Pro Port USB: USB-A 3.0 (na potrzeby skanera bezprzewodowego) Port USB: USB-C 3.2 (na potrzeby skanera przewodowego)
Imprevo	PC stacjonarny lub laptop Procesor: minimum i9 13-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. 1TB SSD Karta graficzna ekran: min. Nvidia RTX 4080 1920x1080 OS: min. Windows 11; zalecana edycja Pro Port USB: USB-A 3.0

Typ skanera	Typ komputera / wymagania sprzętowe
Skaner Shining Elite	PC stacjonarny lub laptop: Procesor: minimum i9 13-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. 1TB SSD Karta graficzna ekran: min. Nvidia RTX 4080 1920x1080 OS: min. Windows 11; zalecana edycja Pro Port USB: USB-A 3.0 + USB-C 3.2
Skaner Shining Elf	PC stacjonarny lub laptop: Procesor: minimum i7 10-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. 1TB SSD Karta graficzna ekran: min. Nvidia GTX 4070 1920x1080* OS: min. Windows 11; zalecana edycja Pro Port USB: min. 2 × USB-A 3.0 <u>*NIE zalecamy używania kart graficznych z serii RTX 50x0 ze względu na brak wsparcia przez producenta oprogramowania skanerowego dla tego modelu [stan na dzień 07.01.2026].</u>
Skaner Shining Aoralscan 3	PC stacjonarny lub laptop: Procesor: minimum i7 10-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. 1TB SSD Karta graficzna ekran: min. Nvidia GTX 4070 1920x1080 OS: min. Windows 11; zalecana edycja Pro Port USB: min. 2 × USB-A 3.0
Skaner Shining Aoralscan L	PC stacjonarny lub laptop: Procesor: minimum i7 10-tej generacji Pamięć RAM: min. 32 GB Dysk twardy: min. 1TB SSD Karta graficzna ekran: min. Nvidia GTX 4070 1920x1080 OS: min. Windows 11; zalecana edycja Pro Port USB: min. 2 × USB-A 3.0

III. Sieć komputerowa

Aby możliwe było wysyłanie skanów do laboratorium, należy połączyć komputery w sieci. Ze względu na wielkość plików, w których zapisane są badania zalecana jest sieć Gigabit Ethernet (1Gb/s).

Nie zaleca się stosowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi jak również najstarsze sieci Ethernet 10Mb/s – w przypadku tego typu sieci mogą występować duże opóźnienia w otwieraniu zdjęć i wyświetlaniu listy pacjentów.